

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-sciegna-achillesa-achimed-p-7813.html>



Stabilizator ścięgna Achillesa Achimed®

Numer katalogowy **9722**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator ścięgna Achillesa

- Oddzielne podpiętki
- Zintegrowana pelota silikonowa
- Bezuciskowa krawędź górna

Stabilizator ścięgna Achillesa ze zintegrowaną pelotą silikonową o kształcie anatomicznym

Achimed jest opatrunkiem ścięgna Achillesa. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne ścięgna Achillesa i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Efekt masażu dzięki zintegrowanym pelotom silikonowym -> zmniejszenie obrzęków i krwiaków
- Ucisk proprioceptywny → Prowadzenie i stabilizacja stawów
- Opcjonalne, wkładane podpiętki zmniejszają bolesny nacisk na ścięgno Achillesa

Sposób działania

Dzięki połączeniu dzianiny uciskowej i dwóch wkładek silikonowych Achimed wywołuje efekt masażu, który poprawia ukrwienie, prowadząc tym samym do szybszej resorpcji obrzęków i krwiaków. Łagodzi także podrażnienia i ból. Jednocześnie orteza poprawia siłę mięśniową i stabilizację własną organizmu w obrębie stawu skokowego.

Instrukcja dotycząca zakładania

Odwiń górną część ortozy aż do nasady wkładki silikonowej na zewnątrz.
Uchwyć ortezę w okolicy środka wkładek silikonowych i naciągnij ją przez stopę aż do prawidłowego ułożenia części piętowej.

Górną część opaski ponownie odgiąć i w razie potrzeby poprawić położenie opaski. Opaska jest poprawnie ułożona, jeżeli szew przebiega przez środek pięty a ścięgno Achillesa znajdzie się w sposób odczuwalny we wgłębieniu peloty.

WAŻNE Kliny piętowe nosić równomiernie ułożone w obu butach, aby zagwarantować tą samą długość nogi. Po ustąpieniu ostrych dolegliwości należy stosować oba kliny piętowe wymiennie (np. co 3 godziny) według własnego odczucia lub nie nosić ich, aby powoli przyzwyczaić ścięgno do normalnych obciążeń.

Pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny.

Wskazówki dotyczące noszenia

Z zasady możliwe jest noszenie ortezy przez cały dzień. Decyzję o tym należy jednak podjąć na podstawie własnych odczuć podczas noszenia. Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować ortezę.

W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Bandaż nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wypłukać.

Skład produktu: Poliamid, Poliester, Elastan

Instrukcja prania

Płyny do płukania tkanin, smary, oleje, lotony, maści i resztki mydła mogą uszkodzić materiał, zaburzyć efekt Clima Comfort i wywołać podrażnienia skóry.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Ostre zapalenia i podrażnienia ścięgna Achillesa
- Przewlekłe stan bólowe spowodowane zużyciem ścięgna Achillesa
- Podrażnienia po urazach i operacjach w związku z obrzękami i krwiakami
- Zapalenie kaletki maziowej w obszarze ścięgna Achillesa

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

Rozmiary:

obwód kostki (cm)	17 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI
numer artykułu	K.020.Δ11	K.020.Δ12	K.020.Δ13	K.020.Δ14	K.020.Δ15	K.020.Δ16

Δ = uzupełnić kolor: 2 = srebrny , 8 = piaskowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI

Kolor: czarny , piaskowy , srebrny