

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-siatkowy-stawu-nadgarstkowego-pt0221-p-2716.html>



Stabilizator siatkowy stawu nadgarstkowego PT0221

Numer katalogowy	PT0221
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po kontuzjach, złamaniach, urazach - przyspiesza leczenie
- zmniejsza obrzęki
- łagodzi ból, stabilizuje nie ograniczając ruchów
- zabezpiecza przed kontuzjami stawu
- wzmacnia staw, zabezpiecza przed ponownymi kontuzjami
- w niedowładach lub porażeniach prostowników nadgarstka
- gruźlica stawu leczona zachowawczo
- zmiany zwyrodnieniowe

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L
Obwód ręki w nadgarstku [cm]	14 - 16	17 - 21	22 - 25

Instrukcja używania:

Stabilizator siatkowy stawu nadgarstkowego wykonany z przewiewnego materiału siatkowego z taśmami samoszczepnymi wzmacniającymi staw i szyną stabilizującą nadgarstek, na prawy (PT 0221P) lub lewy nadgarstek (PT 0221L).

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki w nadgarstku, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzepy. Dłoń umieścić w stabilizatorze tak, aby szyna znajdowała się po stronie wewnętrznej dłoni, następnie zapiąć rzep na śródreżcu. Zapiąć mały rzep na wysokości nadgarstka, a następnie taśmy dociągające regulując dopasowanie indywidualne za pomocą rzepów.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

TYP: lewy , prawy