

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-pt0318-p-2719.html>



## Stabilizator stawu kolanowego PT0318

Numer katalogowy	<b>PT0318</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- zabezpiecza przed kontuzjami stawu podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmożonego wysiłku
- wzmacnia staw, zmniejsza ryzyko powstania ponownej jego kontuzji
- przyspiesza leczenie kontuzji
- koryguje oś stawu i odciąża powierzchnie stawowe kłykci uda i pęczki po przebytym złamaniu
- zabezpiecza przed przeciążeniami aparatu więzadłowo-torebkowego
- łagodzi bóle
- nie ogranicza ruchów

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 - 38	39 - 47	48 - 54	55 - 61	62 - 68

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

##### Sposób zakładania:

Stabilizator założyć poprzez naciągnięcie od dołu na wysokość stawu kolanowego tak, by dokładnie dopasować otwór na rzepkę kolanową.

---

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:****Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL