

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-lociowego-lociec-tenisisty-pt0321-p-2722.html>



## Stabilizator stawu łokciowego - "ŁOKIEĆ TENISISTY" PT0321

Numer katalogowy	<b>PT0321</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- bóle i obrzęki spowodowane nadmierną eksploatacją stawu łokciowego
- kontuzje stawu łokciowego
- osłabienie stawu łokciowego
- stabilizator wzmacnia staw, zmniejsza ryzyko powstania ponownej jego kontuzji
- zabezpiecza przed kontuzjami stawu podczas uprawiania sportu lub w czasie wzmoczonego wysiłku
- przyspiesza leczenie kontuzji
- nie ogranicza ruchów
- łagodzi bóle

Istnieje możliwość regulacji siły ucisku za pomocą regulowanego zapięcia na rzep.

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L
Obwód ręki poniżej stawu łokciowego [cm]	19 - 22	23 - 26	27 - 30

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

##### Sposób zakładania:

Stabilizator zakłada się poprzez nałożenie na wysokość stawu łokciowego tak, aby wkładka od strony wewnętrznej stabilizowała łokieć tenisisty. Następnie należy zapiąć taśmę wzmacniającą.

---

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

- Przed praniem wyjąć wkładkę z kieszonki stabilizatora oraz zapiąć rzep w celu uniknięcia pohaczenia.
- Po praniu umieścić wyjętą wcześniej wkładkę w tym samym miejscu.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S