

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-lokciowego-medi-elastic-elbow-support-p-7847.html>



Stabilizator stawu łokciowego medi elastic elbow support

Numer katalogowy **9757**

Producent **Medi**

Opis produktu

Dziane ŁOKIEĆ

- Bardzo elastyczny
- Anatomicznie ukształtowany
- Działanie kompresyjne

Dziany stabilizator stawu łokciowego

Bardzo elastyczna, dwukierunkowa opaska o anatomicznym kształcie pozwalającym na optymalne dopasowanie. Działanie uciskowe przyspiesza wchłanianie obrzęków i wysięków. Powoduje szybkie gojenie się opuchlizny i złagodzenie bólu w danym obszarze.

Sposób działania

Zapewnia odciążenie podrażnionego stawu i poprawia przepływ krwi do tkanek miękkich otaczających staw poprzez wywieranie stałego ucisku i działanie masujące podczas ruchu pacjenta.

Instrukcja dotycząca zakładania

Opaskę na łokieć uchwycić za jej górną część (etykieta) i naciągnąć na przedramię. Następnie przesunąć ją na łokieć w taki sposób, aby wszyta część ochronna umieszczona była w zgięciu łokcia. Jej ułożenie jest prawidłowe, kiedy łokieć znajduje się w przewidzianej dla niego części opaski.

Skład produktu: Poliamide, Elastan

Instrukcja prania

Tłuszcze, oleje, emulsje i maści mogą uszkodzić materiał opaski. Dlatego należy ją prać przy użyciu środka do prania wełny/rzeczy delikatnych w temperaturze do 30 °C, najlepiej ręcznie i

osobno. Należy unikać tarcia i szorowania.

Po wypraniu należy dobrze wypłukać opaskę i rozwiesić ją w stanie wilgotnym. Nie wyżymać, nie odwirowywać, nie suszyć w suszarce, na kaloryferze lub w bezpośrednim słońcu, nie prasować! Plam nie należy usuwać benzyną ani innymi chemicznymi środkami czyszczącymi. Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Opuchlizny i wysięki śródstawowe
- Podrażnienia o podłożu reumatycznym i zwyrodnieniowym

Przeciwwskazania

- Choroby lub urazy skóry w obszarze zastosowania, zwłaszcza z objawami zapalnymi (nadmierne rozgrzanie, obrzęk lub zaczerwienienie)
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi rąk (np. w przypadku cukrzycy)
- Zaburzenia odpływu chłonki oraz niejednoznaczne obrzęki tkanek miękkich, z dala od obszaru zastosowania
- Choroba zarostowa tętnic
- Obrzęk limfatyczny ręki

Bezwzględne przeciwwskazania

- Arterial occlusive disease
- Lymphoedema of the arm

Rozmiar

5 cm

obwód (cm)	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 35
rozmiar	I	II	III	IV	V
numer artykułu	3.266.001	3.266.002	3.266.003	3.266.004	3.266.005

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V

Kolor: piaskowy