

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-lokciowego-pt0323-p-2724.html>



## Stabilizator stawu łokciowego PT0323

Numer katalogowy	<b>PT0323</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- gruźlica stawu łokciowego, duża wiotkość łokcia
- łokieć cepowaty po urazach i rozległych resekcjach
- przykurcze zgięcia i wyprostu stawu łokciowego
- zabezpieczenie przed kontuzjami stawu
- wzmocnienie stawu, zmniejszenie ryzyka powstania ponownej jego kontuzji
- przyspieszenie leczenia kontuzji
- łagodzenie bólu, zmniejszenie obrzęku

Stabilizator nie ogranicza ruchów.

Istnieje możliwość regulacji w obrębie zapięć na rzepy, zmieniając siłę docisku.

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL
Obwód ręki poniżej stawu łokciowego [cm]	19 - 22	23 - 26	27 - 30	31 - 34

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

##### Sposób zakładania:

---

Stabilizator zakłada się poprzez naciągnięcie od dołu na wysokość stawu łokciowego tak, aby wkładka stabilizowała łokieć tenisisty. Następnie należy zapiąć taśmę wzmacniającą oraz rzep w górnej części stabilizatora.

#### **Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

#### **Przepis prania:**

- Przed praniem wyjąć wkładkę z kieszonki stabilizatora oraz zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.
- Po praniu umieścić wyjętą wcześniej wkładkę w tym samym miejscu.

#### **Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy