

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-levamed-p-7810.html>



## Stabilizator stawu skokowego Levamed®

Numer katalogowy **9719**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Stabilizator stawu skokowego

- Specjalnie dziana strefa komfortu na podbiciu
- Zintegrowana pelota silikonowa
- Bezuciskowa krawędź górna

#### Zalety produktu

- Efekt masażu dzięki zintegrowanym pelotom silikonowym → zmniejszenie obrzęków i krwiaków
- Ucisk proprioceptywny → Prowadzenie i stabilizacja stawów

#### Sposób działania

Dzięki połączeniu dzianiny uciskowej i dwóch wkładek silikonowych Levamed wywołuje efekt masażu, który poprawia ukrwienie, prowadząc tym samym do szybszej resorpcji obrzęków i krwiaków.

Łagodzi także podrażnienia i ból. Jednocześnie orteza poprawia siłę mięśniową i stabilizację własną organizmu w obrębie stawu skokowego.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Odwiń górną część ortezy aż do nasady wkładki silikonowej na zewnątrz.

Uchwyć ortezę w okolicy środka wkładek silikonowych i naciągnij ją przez stopę aż do prawidłowego ułożenia części piętowej.

Z powrotem odwiń górną część ortezy i ewent. podciągnij ją ku górze.

W razie potrzeby popraw położenie wkładek silikonowych tak, aby obydwie leżały prawidłowo wokół kostek.

Pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny.

#### Wskazówki dotyczące noszenia

---

Maksymalną skuteczność ortozy osiągają podczas aktywności fizycznej.

Z zasady możliwe jest noszenie ortozy przez cały dzień. Decyzję o tym należy jednak podjąć na podstawie własnych odczuć podczas noszenia. Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować ortezę.

W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Bandaż nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wypłukać.

**Skład produktu:** Poliamid, Poliester, Elastan

### Instrukcja prania

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał. Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- Uczucie niestabilności stawu skokowego (po wcześniejszych ostrych wzgl. przewlekłych urazach więzadła)
- Podrażnienia w obrębie stawu (np. przeciążenia, urazy, zabiegi) wiążące się z obrzękami i krwiakami
- Stany zapalne stawu (zapalenie stawu)
- Bolesne zużycie stawu (choroba zwyrodnieniowa)

### Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

### Rozmiar:

obwód kostki (cm)	17 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI
numer artykułu	K.010.Δ11	K.010.Δ12	K.010.Δ13	K.010.Δ14	K.010.Δ15	K.010.Δ16

Δ = uzupełnić kolor: 2 = srebrny , 8 = piaskowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI

**Kolor:** czarny , piaskowy , srebrny