

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-levamed-p-7810.html>



Stabilizator stawu skokowego Levamed®

Numer katalogowy **9719**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego

- Specjalnie dziana strefa komfortu na podbiciu
- Zintegrowana pelota silikonowa
- Bezuciskowa krawędź górna

Zalety produktu

- Efekt masażu dzięki zintegrowanym pelotom silikonowym → zmniejszenie obrzęków i krwiaków
- Ucisk proprioceptywny → Prowadzenie i stabilizacja stawów

Sposób działania

Dzięki połączeniu dzianiny uciskowej i dwóch wkładek silikonowych Levamed wywołuje efekt masażu, który poprawia ukrwienie, prowadząc tym samym do szybszej resorpcji obrzęków i krwiaków.

Łagodzi także podrażnienia i ból. Jednocześnie orteza poprawia siłę mięśniową i stabilizację własną organizmu w obrębie stawu skokowego.

Instrukcja dotycząca zakładania

Odwiń górną część ortezy aż do nasady wkładki silikonowej na zewnątrz.

Uchwyć ortezę w okolicy środka wkładek silikonowych i naciągnij ją przez stopę aż do prawidłowego ułożenia części piętowej.

Z powrotem odwiń górną część ortezy i ewent. podciągnij ją ku górze.

W razie potrzeby popraw położenie wkładek silikonowych tak, aby obydwie leżały prawidłowo wokół kostek.

Pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny.

Wskazówki dotyczące noszenia

Maksymalną skuteczność ortozy osiągają podczas aktywności fizycznej.

Z zasady możliwe jest noszenie ortozy przez cały dzień. Decyzję o tym należy jednak podjąć na podstawie własnych odczuć podczas noszenia. Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować ortezę.

W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Bandaż nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wypłukać.

Skład produktu: Poliamid, Poliester, Elastan

Instrukcja prania

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał. Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Uczucie niestabilności stawu skokowego (po wcześniejszych ostrych wzgl. przewlekłych urazach więzadła)
- Podrażnienia w obrębie stawu (np. przeciążenia, urazy, zabiegi) wiążące się z obrzękami i krwiakami
- Stany zapalne stawu (zapalenie stawu)
- Bolesne zużycie stawu (choroba zwyrodnieniowa)

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

Rozmiar:

obwód kostki (cm)	17 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI
numer artykułu	K.010.Δ11	K.010.Δ12	K.010.Δ13	K.010.Δ14	K.010.Δ15	K.010.Δ16

Δ = uzupełnić kolor: 2 = srebrny , 8 = piaskowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI

Kolor: czarny , piaskowy , srebrny