

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-systemem-paskow-levamed-active-p-7811.html>



Stabilizator stawu skokowego z systemem pasków Levamed® active

Numer katalogowy **9720**

Producent **Medi**

Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego z systemem pasków

- Pasek można indywidualnie skracać
- Indywidualnie regulowany i zdejmowany system pasków
- Efekt masażu dzięki zintegrowanym pelotom silikonowym

Bandaż na staw skokowy ze stabilizującym systemem pasów

Levamed active to orteza ze stabilizującym systemem pasków. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu skokowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Indywidualnie regulowany i zdejmowany system pasków z odcinkami elastycznymi i nieelastycznymi → Dodatkowe podtrzymanie i stabilizacja, „ochrona” przed skręceniami (supinacją)
- Efekt masażu dzięki zintegrowanym pelotom silikonowym → Zmniejszenie obrzęków i krwiaków
- Ucisk proprioceptywny → Prowadzenie i stabilizacja stawów

Sposób działania

Opaska stabilizuje staw skokowy poprzez ucisk materiału z obustronnie zintegrowanymi wkładkami silikonowymi oraz dzięki nowemu systemowi pasków. Stosowanie opaski ma efekt masażu, który poprawia ukrwienie oraz przyspiesza zmniejszenie obrzęku i gojenie siniaków.

System pasków wspiera własną stabilizację ciała i daje dodatkowe wsparcie, podobne jak przy tapingu.

Opaska Levamed active dobrze nadaje się do ochrony przed skręceniem.

Sz szczególnie podczas aktywności sportowej, gdy mięśnie są już zmęczone.

Opaska daje największy efekt podczas aktywności fizycznej.

Wskazówki dotyczące noszenia

Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień. Decyzję o tym należy jednak podjąć na podstawie własnych odczuć

podczas noszenia. Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/ prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę.

W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Skład produktu: Poliamid, poliester, elastan

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Ograniczenie zakresu ruchów więzadeł stawu skokowego - niewydolność więzadeł
- Ochrona przed nadmierną supinacją, szczególnie podczas aktywności sportowej
- Stany podrażnienia stawów skokowych (ostre, przewlekłe, pourazowe lub pooperacyjne)
- Lekkie uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie)
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich w okolicy zastosowania opaski

Rozmiar:

obwód kostki (cm)	17 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI
numer artykułu	K.011.5◇1	K.011.5◇2	K.011.5◇3	K.011.5◇4	K.011.5◇5	K.011.5◇6

◇ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI

Kolor: czarny