

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-kciuka-orliman-opl354-di-opl355-di-p-2547.html>



## Szyna kciuka ORLIMAN OPL354 D/I – OPL355 D/I

Numer katalogowy	<b>OPL354 D/I – OPL355 D/I</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z półsztywnego, półprzepuszczalnego materiału, o zewnętrznej perforowanej strukturze wyłożonego od wewnątrz frotte. Posiada aluminiową szynę kciukową, która może być modelowana. Oba brzości stabilizatora po stronie grzbietowej połączone są materiałem z dodatkiem Lycry, zapinanie na taśmy velcro przeciągane przez sprzączki.

#### Zastosowanie:

skręcenia, zapalenie ścięgna, choroby zwyrodnieniowe i zapalenie stawów kciuka, leczenie pooperacyjne i pourazowe.

#### Dobór:

Produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.

#### Dopasowanie:

1. Rozluźnić taśmy znajdujące się w części grzbietowej ortezy oraz kciuka, odpinając w tym celu zapięcia micro-velcro.
2. Nadać aluminiowej szynie kształt zapewniający uzyskanieżądanego kąta zgięcia oraz ustawienia kciuka.
3. Wsunąć dłoń do ortezy, umieszczając kciuk w przeznaczonym na niego otworze. Należy upewnić się przy tym, że szyna pozostaje odpowiednio wycelowana w stosunku do osi kciuka.
4. Dociągnąć i zapiąć taśmy w taki sposób, aby zapewnić mocne i wygodne zapięcie.

**Kolor:**czarny: OPL354 D (prawy)/ OPL354 I (lewy) // beżowy: OPL355 D (prawy)/ OPL355 I (lewy)

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2	3
Obwód nadgarstka (cm)	19-21	21-23	23-25

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3

**Kolor:** beżowy , czarny

**TYP:** lewy , prawy