

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-nadgarstka-orliman-opl350-di-opl351-di-p-2544.html>



## Szyna nadgarstka ORLIMAN OPL350 D/I - OPL351 D/I

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>OPL350 D/I - OPL351 D/I</b> |
| Producent        | <b>Orliman</b>                 |

### Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z półsztywnego, półprzepuszczalnego materiału, o zewnętrznej perforowanej strukturze wyłożonego od wewnątrz frotte. Posiada aluminiową szynę dłoniową, która może być modelowana. Oba brzegi stabilizatora po stronie grzbietowej połączone są materiałem z dodatkiem Lycry, zapinanie na taśmy velcro przeciągane przez sprzączki.

#### Zastosowanie:

skręcenia, zapalenie ścięgna, choroby zwyrodnieniowe i zapalenie stawów, zespół cieśni nadgarstka, leczenie pooperacyjne i pourazowe.

#### Dobór:

Produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.

#### Dopasowanie:

1. Rozluźnić taśmy znajdujące się w części grzbietowej ortezy, odpinając w tym celu zapięcia micro-velcro.
2. Nadać aluminiowej szynie kształt zapewniający uzyskanieżądanego kąta zgięcia dłoniowego/grzbietowego.
3. Wsunąć dłoń do ortezy, umieszczając kciuk w przeznaczonym na niego otworze. Należy upewnić się przy tym, że szyna pozostaje odpowiednio wycelowana w stosunku do osi nadgarstka i przedramienia (po stronie dłoniowej).
4. Dociągnąć i zapiąć taśmy w taki sposób, aby zapewnić mocne i wygodne zapięcie.

**Kolor:** czarny: OPL350 D (prawy)/ OPL350 I (lewy) // beżowy: OPL351 D (prawy)/ OPL351 I (lewy)

#### Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR               | 1     | 2     | 3     |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Obwód nadgarstka (cm) | 19-21 | 21-23 | 23-25 |

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** lewy , prawy

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3

**Kolor:** beżowy , czarny

