

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-odwodzaca-bark-medi-sas-15-p-7843.html>



Szyna odwodząca bark medi SAS® 15

Numer katalogowy **9753**

Producent **Medi**

Opis produktu

Szyna odwodząca bark

- Ćwiczenie przedramienia przez podpórkę dłoni
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Wczesna funkcjonalna opieka po leczeniu

Szyna odwodząca bark – odwiedzenie 15°

medi SAS 15 to orteza odwodząca stawu barkowego. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu barkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Położenie odwiedzenia 15° w celu uniknięcia zrostu do dołu pachowego (zamrożony bark)
- Pozycja boczna w odwiedzeniu 15° w celu odciążenia rąbka brzuszno i torebki stawowej
- W celu uniknięcia zeszywnienia barku

Sposób działania

Zmiana ustawienia kąta stawu możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego.

Instrukcja dotycząca zakładania

O ile to tylko możliwe, stabilizator należy zakładać i zdejmować na stole. Należy przy tym stosować się do następujących wskazówek dotyczących zakładania: rzepy z przodu poduszki oraz pętelki powinny być rozpięte. Pas barkowy i biodrowy rozłożyć wcześniej na stole. Operowane ramię położyć na otwartym worku, tak by dłoń leżała na piłce. Następnie zapiąć wszystkie pętelki. Pas biodrowy przełożyć za plecami do przodu i zapiąć rzep.

Następnie pas barkowy przełożyć przez zdrowy bark do przodu, a ramię włożyć w otwór między pasem barkowym i pachowym. Zapiąć rzep.

Zasadniczo produkt należy stosować na zlecenie lekarza. Przy pierwszym zakładaniu należy stosować się do wskazówek personelu specjalistycznego, np. technika ortopedii. Specjalistyczne i indywidualne dopasowanie gwarantuje skuteczność i komfort stosowania.

Jednoczesne stosowanie z innymi produktami należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Skład produktu: Pianka PU, Poliamid

Instrukcja prania

Produktu nie należy nosić w wodzie. Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki mydła, kremu lub maści mogą spowodować podrażnienia skóry i zużycie materiału.

Do prania poszewkę poduszki, torbę i pasy najlepiej używać środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Zachowawczo i pooperacyjnie do obniżenia ciśnienia przestrzeni podbarkowej przy ostrym chronicznym zapaleniu kaletki stawu barkowego
- Zapobiegawcze unieruchomienie pierwszego zwichnięcia w stawie barkowym.
- Pooperacyjne unieruchomienie po artroskopowych usunięciach złogów wapnia w obrębie mankietu rotatorów
- Impingement Syndrom
- Frozen Shoulder (zamrożony bark) po unieruchomieniu pod narkozą
- Implantacja protezy barkowej
- Pooperacyjnie po zabiegach rekonstrukcji mankietu rotatorów

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nieznane.

Rozmiar

długość od łokcia do kostek	do 34	35 - 39	powyżej 39
dłoni (cm)			
rozmiar	S	M	L
numer artykułu	R.011.002	R.011.003	R.011.004

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

Kolor: szary