

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-odwodzaca-bark-medi-sas-multi-p-7845.html>



## Szyna odwodząca bark medi SAS® multi

Numer katalogowy **9755**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Szyna odwodząca bark

- Indywidualna regulacja dzięki oddzielnemu klinowi
- Bezpieczne wsparcie nawet w pozycji leżącej
- Ćwiczenia przedramienia przez podpórkę dłoni

### Szyna odwodząca bark

medi SAS multi jest poduszką odwodzącą bark. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne barku i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

#### Zalety produktu

- Zapobiega zrostowi części pachowej
- Odciąża przestrzeń podbarkową
- Zapewnia wsparcie rąbka brzuszego i torebki stawowej

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Pierwsze założenie ortozy następuje najczęściej w sali operacyjnej.

Jeżeli to możliwe, zdejmowanie i zakładanie ortozy powinno odbywać się na stole. Należy przy tym przestrzegać następujących wskazań:

Zapięcia samozatraskowe przedniej części poduszki powinny być otwarte.

Pas barkowy położyć na stole.

Proszę włożyć operowane ramię do otwartej kieszeni.

Następnie proszę zapiąć kieszeń.

W celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia proszę stosować również dołączony rzep.

W razie wskazań należy zapinać na rzep zewnętrzny klin rotacyjny.

Należy koniecznie upewnić się, że wskazania obejmują również położenie w rotacji zewnętrznej.

Proszę poprowadzić pas biodrowy z tyłu za plecami w kierunku do przodu i zapiąć zapięcie samozatraskowe.

---

Proszę poprowadzić pas barkowy poprzez zdrowy bark do przodu. Dłoń po stronie dotkniętej urazem powinna sięgać końcówki zapięcia.

Teraz należy wejść w otwór pomiędzy pasem barkowym a pachowym.

Jako ostatni krok, proszę zapiąć zapięcie samozatraskowe.

Jeżeli mają Państwo w domu kogoś do pomocy, zakładanie pasa barkowego można przeprowadzić w prostszy sposób. Należy powiedzieć osobie pomagającej, aby całkowicie zdjęła pas barkowy (otworzyć zapięcia samozatraskowe). Teraz może ona pomóc Państwu założyć pas barkowy tak, jak zakłada się kurtkę.

Następnie należy postępować w sposób, jak opisano powyżej. Pas barkowy zostanie wtedy zapięty tylko na poduszce. Jeżeli nocą pojawi się wrażenie, że ramię lub bark nie są bezpiecznie ułożone, można wsunąć pod ortezę poduszkę lub nieco mocniej ściągnąć pasek wokół bioder.

Produkt zasadniczo należy stosować za zaleceniem lekarza, a pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny np. przez technika ortopedycznego. Fachowe i indywidualne dopasowanie opaski zapewnia skuteczność jej zastosowania i komfort przy noszeniu. Równoczesne używanie opaski wraz z innymi produktami należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie.

### Wskazówki dotyczące noszenia

Zmiana ustawienia kąta stawu możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego.

**Skład produktu:** Pianka poliuretanowa, Poliamid

### Instrukcja prania

Produktu nie należy nosić w wodzie.

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Poszewkę poduszki, torbę i pasy najlepiej prać ręcznie przy użyciu środka do mycia medi clean lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- Unieruchomnienie po zabiegu implantacji protez barku
- Unieruchomnienie po rekonstrukcji rozdartego pierścienia rotatorów
- Unieruchomnienie po operacji złamania główki kości ramiennej

### Przeciwwskazania

- Brak

### Rozmiar

długość od łokcia do kostek dłoni (cm)

rozmiar

numer artykułu

do 34 powyżej 35

S L

R.022.009 R.023.009

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , S

**Kolor:** szary