

Link do produktu: <https://akmed.pl/szyna-unieruchamiajaca-kolano-20-medi-classic-p-7880.html>



Szyna unieruchamiająca kolano 20° medi Classic

Numer katalogowy **9790**

Producent **Medi**

Opis produktu

Szyna unieruchamiająca kolano 20°

- Indywidualna regulacja
- Przyjazny dla skóry, nadający się do prania materiał frotte
- Wyjmowane pręty stabilizacyjne

Orteza unieruchamiająca kolano 20°

medi Classic jest ortezą unieruchamiającą staw kolanowy. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu kolanowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Korzyści produktu

- indywidualne dopasowanie do obwodu nogi.
- wyciągane szyny stabilizujące przyśrodkowa, boczna i tylnia.
- przyjemny, przyjazny skórze materiał frotte, łatwy do prania.

Sposób działania

- unieruchomienie kolana w pozycji pod kątem 20°

Instrukcja dotycząca zakładania

Odpiąć wszystkie paski z rzepami i położyć ortezę pod nogą pacjenta.

Uwaga: Istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia boków szyny medi Classic. W tym celu należy odpiąć boczne rzepy i ponownie przymocować je w odpowiedniej pozycji.

Jeżeli jest to konieczne istnieje możliwość ograniczenia środkowych i bocznych płaskowników .

Boki szyny ułożyć wokół nogi w ten sposób, aby pozostawić wolną rzepkę kolanową.
Następnie zapiąć paski z rzepami w części szyny wokół podudzia, a później paski z rzepami w części szyny wokół uda.
Ponownie mocno ściągnąć pasek z rzepem wokół kolana.

Wskazówki dotyczące noszenia

Podczas pierwszych godzin po założeniu szyny możliwe jest wystąpienie bólu w łydkach.
Jeżeli ból wyraźnie nie ustąpi po upływie 24 godzin, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia nagłego bólu, obrzęku, braku czucia, uczucia zimnych stóp lub sinych palców u stóp, należy skontaktować się z lekarzem.
Czekając na lekarza, poluzować paski z rzepami i unieruchomić nogę do momentu otrzymania dalszych wskazówek.

Skład produktu: Aluminium, Bawełna, PU, Poliester

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- pooperacyjne unieruchomienie
- przedoperacyjne stany bólowe
- stan po zwknięciu rzepki
- po uszkodzeniu więzadeł

Przeciwwskazania

- Zakrzepica żył głębokich nogi i uda

Rozmiar

długość (cm)	40	50	60	40	50	60
wariant	0°			20°		
numer artykułu	5.650.312	5.650.313	5.650.314	5.650.322	5.650.323	5.650.324

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: niebieski

Długość: 40 cm , 50 cm , 60 cm