

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-konczyny-gornej-pt0204a-p-2728.html>



## Temblak kończyny górnej PT0204A

Numer katalogowy	<b>PT0204A</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XXS	XS	S	M	L	XL
Obwód klatki piersiowej [cm]		50 – 60	61 – 75	76 – 91	92 – 107	> 107

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów.

##### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXS