



## Temblak kończyny górnej PT0204A

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | <b>PT0204A</b>     |
| Producent        | <b>Pani Teresa</b> |

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

#### Tabela rozmiarów

| ROZMIAR                         | XXS | XS      | S       | M       | L        | XL    |
|---------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------|-------|
| Obwód klatki<br>piersiowej [cm] |     | 50 – 60 | 61 – 75 | 76 – 91 | 92 – 107 | > 107 |

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów.

##### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXS