

Link do produktu: <https://akmed.pl/temblak-konczyny-gornej-typu-podwieszka-rozmiar-uniwersalny-pt0210-p-2729.html>



## Temblak kończyny górnej typu "PODWIESZKA" - rozmiar uniwersalny PT0210

Numer katalogowy	<b>PT0210</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w niedowładach kończyny górnej np. po udarze mózgu
- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

Podwieszka jest produkowana w jednym standardowym rozmiarze z możliwością indywidualnego dopasowania.

##### Sposób zakładania:

Są dwa sposoby zakładania wyrobu:

1. Podwieszkę przełożyć przez szyję, przedramię umieścić w „oczku” podwieszki. Odpowiednią długość podwieszki wyregulować indywidualnie za pomocą rzepów.
2. Przedramię umieścić w „oczku” podwieszki, pasek podwieszki przełożyć do tyłu, przez plecy, szyję i drugie ramię, a następnie z przodu umieścić przedramię w drugim oczku podwieszki. Odpowiednią długość podwieszki wyregulować indywidualnie za pomocą rzepów.

##### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

##### Przepis prania:

---

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** bordowy , granatowy , popielaty