




## Termofor gumowy 2L SANITY

Numer katalogowy	<b>6999</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Termofor gumowy 2 l to klasyczne rozwiązanie dla osób szukających prostych i naturalnych rozwiązań w domowym leczeniu.

Skuteczny termofor, który oferujemy posiada wiele zastosowań - można go stosować podczas zbijania gorączki, czy też jako ciepły okład kojący napięte mięśnie, czy różnego typu stany bólowe np. bóle brzucha.

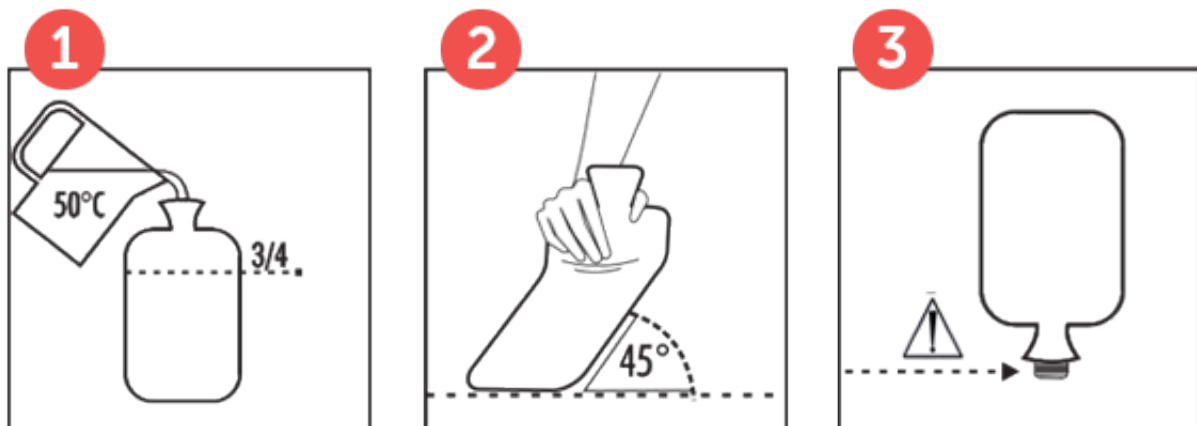

1. Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50°. Nie stosuj wrzątku oraz wody mogącej wywołać oparzenie. Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do  $\frac{3}{4}$  jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
2. Pozbądź się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylanie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
3. Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność odwracając termofor do dołu. Następnie załóż pokrowiec.

Po użyciu wylej wodę i powieś termofor wlewnem do dołu, w celu jego osuszenia. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikaj kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.

---

Termofor gumowy przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Termofor może być używany przez dzieci zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Unikaj długiego, bezpośredniego kontaktu ze skórą termofora bez pokrowca. Nie obciążaj termoforu gdy jest on napełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze oraz na nim. Przed użyciem każdorazowo sprawdź wyrób pod kątem zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób. Zutylicuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Uwaga:** zastosowanie gorącej wody o temperaturze powyżej 70°C skraca żywotność termoforu, może spowodować jego uszkodzenie i w konsekwencji doprowadzić do oparzenia. Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej. Zachowaj instrukcję użytkowania.