

Link do produktu: <https://akmed.pl/termofor-gumowy-w-pokrowcu-2l-sanity-p-7158.html>




Termofor gumowy w pokrowcu 2L SANITY

Numer katalogowy	6998
Producent	Sanity

Opis produktu

Termofor gumowy w pokrowcu o pojemności 2 litrów to jedna z naszych propozycji termoforów dla dorosłych. Wysokiej klasy guma zagwarantuje doskonałą termikę, natomiast pokrowiec zapewni przyjemny dotyk dla ciała.

Dobry termofor zda egzamin w domowej terapii przeziębień, czy też innych stanów chorobowych. Termofor jest wyrobem medycznym.

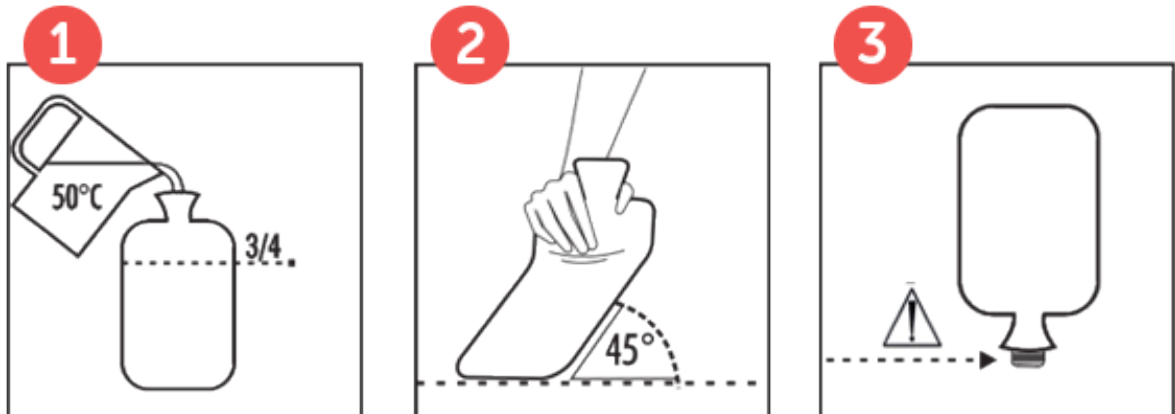

1. Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50°. Nie stosuj wrzątku oraz wody mogącej wywołać oparzenie. Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do $\frac{3}{4}$ jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
2. Pozbądź się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylenie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
3. Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność odwracając termofor do dołu. Następnie załóż pokrowiec.

Termofor może być stosowany przy bólach brzucha, bólach mięśniowych i reumatycznych, kolkach u niemowląt i dzieci, przeziębieniu i grypie. Działa kojąco na zapalenia stawów, zapalenie ucha, problemy z krążeniem, bóle żołądkowe, schorzenia układu moczowego, skurcze mięśni gładkich, przepuklinę oraz bóle zębów.

Po użyciu wylej wodę i powieś termoфор wlewem do dołu, w celu jego osuszenia. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikaj kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.

Pokrowiec wykonany jest z poliestru. W razie jego zabrudzenia prać ręcznie, używając mydła i wody o temperaturze 30°C. Termoфор gumowy przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Termoфор może być używany przez dzieci zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Unikaj długiego, bezpośredniego kontaktu ze skórą termoфора bez pokrowca. Nie obciążaj termoforu gdy jest on napełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze oraz na nim. Przed użyciem każdorazowo sprawdź wyrób pod kątem zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób. Zutylicuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.