




## Termofor KACZUSZKA (2L) SANITY

Numer katalogowy	<b>6993</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Termofor Kaczuszka o pojemności 2 l jest praktycznym rozwiązaniem dla rodziców, którzy chcą w naturalny sposób złagodzić różnego typu dolegliwości bólowe swoich pociech, jak też zapewnić dodatkowe źródło ciepła.

Skuteczny termofor wyposażony jest w bezpieczny szczelny kurek, oraz prosty system napełniania. Dodatkowo gumowy termofor ubrany został w wysokiej klasy pokrowiec w formie kaczuszki, idealny dla małego dziecka.

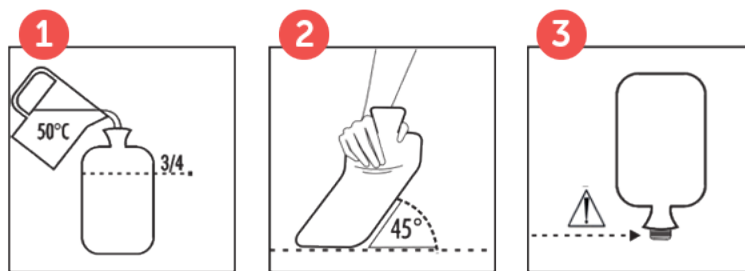

1. Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50°. Nie stosuj wrzątku oraz wody mogącej wywołać oparzenie. Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do  $\frac{3}{4}$  jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
2. Pozbądź się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylenie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
3. Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność odwracając termofor do dołu. Następnie załóż pokrowiec.

Termofor może być stosowany przy bólach brzucha, bólach mięśniowych i reumatycznych, kolkach u niemowląt i dzieci, przeziębieniu i grypie. Działa kojąco na zapalenia stawów, zapalenie ucha problemy z krążeniem, bóle żołądkowe, schorzenia układu moczowego, skurcze mięśni gładkich, przepuklinę oraz bóle zębów.

Po użyciu wylej wodę i powieś termofor wlewnem do dołu, w celu jego osuszenia. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikaj kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.

Pokrowiec wykonany jest z poliestru. W razie jego zabrudzenia prać ręcznie, używając mydła i wody o temperaturze 30°C. Termofor gumowy przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

---

Termofor może być używany przez dzieci zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Unikaj długiego, bezpośredniego kontaktu ze skórą termofora bez pokrowca. Nie obciążaj termoforu gdy jest on napełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze oraz na nim. Przed użyciem każdorazowo sprawdź wyrób pod kątem zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób. Zutylicuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.