

Link do produktu: <https://akmed.pl/termometr-basictemp-sanity-p-7148.html>




## Termometr BASICTEMP SANITY

Numer katalogowy	<b>6986</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Cyfrowy termometr BasicTemp umożliwia szybki pomiar temperatury ciała w sposób dotykowy. Model posiada wskaźnik zużycia baterii, funkcję automatycznego wyłączenia oraz automatycznego zapisu ostatniego wykonanego pomiaru.

Chociaż ogólnie przyjęta „normalna” temperatura to 37.0°C to odczyt odczyty temperatury mogą różnić się od 36.1°C do 37.2°C i nadal mogą być uważane za „normalne”. Na zmiany temperatury mogą mieć wpływ różne czynniki, np. ćwiczenia, palenie tytoniu, jedzenie i picie. Twoja temperatura jest niższa rano niż po południu. Zróżnicowanie poziomu temperatury może też być uzależnione od położenia punktu odczytu temperatury. Choć temperatura mierzona w ustach dopowiada wytycznym opisanym wcześniej, temperatura odbytu jest zwykle 0.5C wyższa. Odwrotnie, temperatura pod pachą będzie 0.5C niższa.

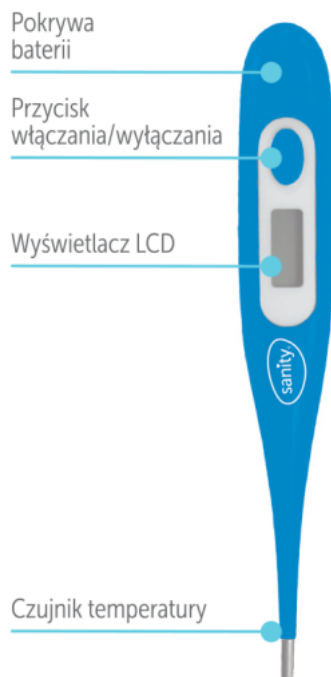

#### **Bezpieczeństwo:**

1. Termometr powinien być stosowany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Nie należy chodzić, biegać i mówić podczas mierzenia temperatury.
3. Urządzenie przechowywać w futerale, gdy nie jest w użyciu.
4. Nie przechowuj urządzenia w miejscu gdzie byłby on narażony na bezpośrednie światło słoneczne, kurz i wilgoć. Należy unikać skrajnych temperatur.
5. Należy unikać upuszczania termometru i narażania go na silne wstrząsy.
6. Nie wolno demontować urządzenia - z wyjątkiem wymiany baterii.

#### **Instrukcja czyszczenia:**

Przed i po każdym użyciu należy oczyścić termometr miękką szmatką i alkoholem izopropylowym rozcieńczonym wodą lub umyć w zimnej wodzie z mydłem. Nie moczyć przez dłuższy okres czasu. Nie sterylizować przez gotowanie w autoklawie, gazowo lub parowo.