

Link do produktu: <https://akmed.pl/unieruchomienie-kolana-medi-pts-p-7883.html>



## Unieruchomienie kolana medi PTS®

Numer katalogowy **9793**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Unieruchomienie kolana

- Indywidualne pozycjonowanie peloty łydkowej
- Indywidualna regulacja
- Przyjazny dla skóry, nadający się do prania materiał

### Orteza tylnno-piszczelowa, orteza unieruchamiająca kolano

medi PTS jest ortezą unieruchamiającą staw kolanowy. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu kolanowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

#### Korzyści produktu

- indywidualne dopasowanie długości podkładki pod łydkę.
- indywidualne i szybkie dopasowanie do obwodu nogi.
- przyjemny, przyjazny skórze materiał frotte, łatwy do prania.

#### Sposób działania

- położenie łydki w pozycji przedniej w porównaniu z udem poprzez podkładkę pod łydkę
- odciążenie tylnego więzadła krzyżowego i redukcja nacisku na staw rzepkowo-udowy
- unieruchomienie kolana w pozycji pod kątem 0°

#### Instrukcja dotycząca zakładania

---

Proszę przypiąć pelotę łydkową do ortezy tak, aby górna krawędź peloty kończyła się na oznaczeniu znajdującym się na ortezie. Dolny koniec peloty z podzielonym językiem powinien dochodzić do górnej krawędzi kostki. Jeżeli pelota jest za długa, można ją przyciąć w górnej części. Uwaga: pelota nie może wystawać powyżej oznaczenia.

Proszę ustawić pręty stabilizujące, przeznaczone do użycia w części tylnej, na środku tylnej strony nogi. Jeśli to konieczne można poodginać pręty przeznaczone do zastosowania w części bocznej i przyśrodkowej.

Proszę założyć na nogę części boczne tak, aby wokół rzepki pozostało trochę wolnego miejsca. Aby dopasować ortezę do obwodu nogi można jej części wewnętrzne zapiąć luźniej lub ciaśniej.

Proszę najpierw zapiąć paski rzepowe na udzie, a następnie paski na kości piszczelowej. Pasek rzepowy znajdujący się bezpośrednio nad kolaniem należy jeszcze raz zaciągnąć.

### Wskazówki dotyczące noszenia

Podczas pierwszych godzin po założeniu szyny możliwe jest wystąpienie bólu w łydkach.

Jeżeli ból wyraźnie nie ustąpi po upływie 24 godzin, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia nagłego bólu, obrzęku, braku czucia, uczucia zimnych stóp lub sinych palców u stóp, należy skontaktować się z lekarzem.

Czekając na lekarza, poluzować paski z rzepami i unieruchomić nogę do momentu otrzymania dalszych wskazówek.

**Skład produktu:** Aluminium, Bawełna, PU, PE

### Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- zachowawcza terapia po świeżych zerwaniach tylnego więzadła krzyżowego
- pooperacyjne unieruchomienie po rekon- strukcji tylnego więzadła krzyżowego
- do czasowego unieruchomienia po wszczępieniu endoprotezy stawu kolano- wego
- niemożliwość wyprostowania przy zwężeniu szpary stawowej
- niereagujący na terapię ból rzepkowo-udowy (również choroba Sinding-Larsen-Johannson)
- ostry przedni ból kolana

### Przeciwwskazania

- Zakrzepowe zapalenie żył uda i podudzia
- Izolowane rozdarcie lub niewydolność przedniego więzadła krzyżowego

### Rozmiar

długość (cm)	45	55	60	65
numer artykułu	5.650.222	5.650.223	5.650.132	5.650.224

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** biały

---

**Długość:** 45 cm , 55 cm , 60 cm , 65 cm