

Link do produktu: <https://akmed.pl/uniwersalna-podpora-unieruchomienie-barku-medi-shoulder-sling-p-7841.html>



## Uniwersalna podpora unieruchomienie barku medi Shoulder sling

Numer katalogowy **9751**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Uniwersalna podpora unieruchomienie barku

- Łatwy dostęp do kontroli rany
- Łatwa regulacja

### Podpora stawu barkowego do unieruchomienia

medi Shoulder sling to orteza stabilizująca bark. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu barkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę do prawidłowego opatrywania ran.

#### Zalety produktu

- Zapewnia bezproblemową kontrolę rany
- Możliwość ograniczonych ćwiczeń podczas późniejszych etapów leczenia dzięki łatwemu zdejmowaniu temblaka barkowego

#### Sposób działania

Stabilne unieruchomienie barku i górnej części ramienia  
Dodatkowa stabilizacja dzięki opasce piersiowej

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Otworzyć zapięcie velcro.

Włożyć ramię chorego barku do kieszeni.

Założyć oba pasy barkowe na krzyż na tułowi i założyć na barku.

Chwycić jeden z obu końców pasa i zapiąć z przodu na kieszeni. Te same czynności powtórzyć przy drugim pasie.

W razie konieczności lub dla lepszego zamocowania (głównie w nocy) można

---

Dodatkowo zamocować szeroki pas. Zapiąć go z tyłu (na łokciu) przy kieszeni i najpierw opasać wokół brzucha, a następnie wokół pleców.  
Ręka powinna pozostać wolna.

**Skład produktu:** Poliamid

### **Instrukcja prania**

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### **Wskazania**

- Leczenie pooperacyjne i unieruchomienie

### **Przeciwwskazania**

- Wszystkie wskazania, w których konieczne jest odwiedzenie i/lub rotacja zewnętrzna

### **Rozmiar**

rozmiar  
numer artykułu

uniwersalny  
R.030.G19