

Link do produktu: <https://akmed.pl/universalny-pas-brzuszy-30-zamkniety-pt0115-p-2593.html>



## Uniwersalny pas brzuszny "30" zamknięty PT0115

Numer katalogowy	<b>PT0115</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach jamy brzusznej - pas ułatwia poruszanie się
- zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
- pas wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej
- w przebiegu chorób zwyrodnieniowo - zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi ból
- pas wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczeniu trzewi jamy brzusznej
- ma działanie ocieplające

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 140	> 140

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Pas wciągnąć przez nogi na wysokość brzucha i talii.

##### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

**Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.**

W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

**Pas wciągany jest przez nogi.**

Szerokość pasa 30 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL