

Link do produktu: <https://akmed.pl/urzadzenie-multifunkcyjne-baffin-trio-p-8095.html>

Urządzenie multifunkcyjne Baffin TRIO



Numer katalogowy

13306

Producent

LIW Care

Opis produktu

Baffin TRIO

Urządzenie multifunkcyjne Baffin TRIO przeznaczone jest do pionizacji pacjenta oraz pozycjonowania go w pozycji siedzącej. Produkowany jest w dwóch rozmiarach I, II.

Urządzenie zbudowane jest z siedziska, oparcia pleców, pelot bocznych, podnóżka z platformami stóp, zagłówka, nakolannika, pasów biodrowych, kamizelki, stolika oraz podstawy stanowiącą podporę urządzenia. Całość pokryta jest tapicerką, którą można zdejmować do prania.

Dzięki innowacyjnym systemom wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz korekcji miednicy to znakomite narzędzie dla fizjoterapeutów ułatwiające pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej oraz wyprostowanej.

Baffin TRIO jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od stycznia 2014 roku urządzenie można nabyć jako wyrób medyczny typu urządzenie multifunkcyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Urządzenie posiada bowiem funkcję pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej oraz funkcję transportową.

Cechy Baffin TRIO

Baffin TRIO, dzięki innowacyjnemu systemowi wbudowanego „kręgosłupa”, umożliwia podparcie kręgosłupa na całej długości linii pleców, co pozwala zmniejszyć nacisk na pojedyncze kręgi, a wielopozycyjność umożliwia zmianę wektora napięcia osiowego. Baffin TRIO pozwala na budowanie prawidłowego wzorca postawy w siadzie. Pacjent zaopatrzony w urządzenie może brać udział w zajęciach edukacyjnych, terapii zajęciowej oraz zabawie. Sprzyja aktywizacji pacjenta oraz budowaniu funkcji poznawczych.

Baffin TRIO to przyjazne i funkcjonalne urządzenie zarówno dla pacjenta jak oraz opiekuna. Posiada:

- bardzo duży zakres regulacji – w jednym urządzeniu może przebywać dziecko o wzroście 135 cm i osoba dorosła do 170 cm
- duże możliwości biernej korekcji postawy w pozycji siedzącej, stojącej i leżącej

-
- możliwość ustawienia pozycji pośrednich w celu uzyskania jak największego komfortu dla pacjenta
 - możliwość pionizacji z każdej pozycji - siedzącej, leżącej i pozycji pośrednich
 - funkcję transportowa - jedno z niewielu urządzeń, w którym możemy przemieszczać się z pacjentem w pozycji stojącej
 - duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów użytkownika
 - możliwość przyjmowania nie tylko pozycji stojącej, ale także siedzącej i leżącej z zachowaniem stabilizacji
 - system wyjmowanych podpaszek, pelot biodrowych i podłokietników ułatwiające przeniesie pacjenta na urządzenie
 - system wygodnych i regulowanych podłokietników
 - intuicyjne i przyjazne sterowanie za pomocą pilota.

Dla kogo? Baffin TRIO

Baffin TRIO znajduje najczęściej zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych: mózgowie porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, porażenia różnego pochodzenia, rozczep kręgosłupa, przepukliny oponowo-rdzeniowe, stany po urazach kręgosłupa, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po udarach, wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

Wskazania:

- poprawa czynności układu sercowo-naczyniowego
- zapobieganie i leczenie zastoju żylnych
- poprawa wentylacji płuc i zapobieganie zapalenia płuc
- zapobieganie zatorom tętnicy płucnej
- zapobieganie i leczenie osteoporozy
- zapobieganie i leczenie zastoju w układzie moczowym
- poprawa perystaltyki jelit
- pomoc w reedukacji pęcherza neurogennego
- poprawa stanu psychicznego
- zapobieganie zanikom mięśni
- zapobieganie i leczenie przykurczów, poprawa ruchomości stawów
- leczenie i spowalnianie postępu skoliozy u dzieci i młodzieży z utraconą funkcją chodu
- budowanie prawidłowego wzorca siadu.

Przeciwwskazania do korzystania z Baffina TRIO pokrywają się z przeciwwskazaniami do pionizacji. Zalicza się do nich:

- atypowa niepożądana reakcja na pionizację,
- stany zapalne stawów różnego pochodzenia,
- stany pourazowe po złamaniach kości długich z niepełnym zrostem,
- stany po zwknięciu i innych urazach stawów,
- zwiększona temperatura ciała.

Baffin TRIO jest wykonywany na zlecenie lekarza rehabilitacji.

Urządzenie Baffin TRIO, dzięki swojej konstrukcji, nie wyklucza z pionizacji pacjentów z przykurczami utrwalanymi stawu biodrowego i kolanowego. Jednak takie przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie.

Akcesoria Baffin TRIO

HEADPOD

Dynamiczny System Podtrzymujący Głowę dla osób z obniżonym napięciem mięśniowym szyi i tułowia. Dynamiczny zagłówek

Stolik

Duża przestrzeń robocza blatu zapewnia dużą wygodę przy jedzeniu posiłków oraz zabawach.

Zagłówek

Dopasowujący się do kształtu i pozycji głowy. Doskonała stabilizacja najważniejszej części ciała małego pacjenta.

System pelot, kamizelka i pasy stabilizujące

Umożliwiają korekcję wad postawy - prawidłowe ustawienie kręgosłupa i miednicy użytkownika.

Do pobrania Baffin TRIO

- [Dane techniczne](#)
- [Deklaracja CE](#)
- [Instrukcja obsługi](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II