

Link do produktu: <https://akmed.pl/wczesna-mobilizacja-czynnosciowa-medi-rom-walker-p-7887.html>



## Wczesna mobilizacja czynnościowa medi ROM Walker

Numer katalogowy **9797**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Wczesna mobilizacja czynnościowa

- Łatwe użycie dzięki opatentowanemu zawiasowi „QuickSet”
- Bezpieczne mocowanie dzięki dodatkowemu paskowi na piętę
- 

### Walker z regulacją zakresu ruchomości i butem medi (stałym)

medi ROM Walker jest ortezą podudzia i stopy. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortotyczne stopy i tylko na nieuszkodzoną skórę.

#### Korzyści produktu

- nowy opatentowany zawias QuickSet (łatwy w użyciu).

#### Sposób działania

- dodatkowo stały kąt usztywnienia stawu lub częściowe uruchomienie, co pozwala na wczesną funkcjonalną mobilizację
- możliwość ograniczenia zgięcia podeszwy: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- możliwość ograniczenia zgięcia grzbietu: 0°, 10°, 20°
- możliwość unieruchomienia na każdym 10° kącie ustawienia

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Należy odpiąć wszystkie paski z rzepami oraz poduszkę na nogę i stopę. Proszę włożyć teraz nogę i stopę do poduszki tak, aby pięta twardo stała na przeznaczony dla niej desce, następnie proz się zapiąć wyściółkę. Gdy pacjent ma bardzo szczupłe podudzie, a wyściółka przy nodze zachodzi mocno na siebie, można ją przyciąć nożyczkami na właściwą długość. Proszę włożyć stopę w twardą osłonę Walkera. Dwie, umieszczone po obydwu stronach szyny prowadzące powinny przylegać zawsze dokładnie do wewnętrznej i zewnętrznej linii środkowej podudzia. Następnie zapiąć obydwie paski z rzepami w obszarze stopy oraz tylny pas przytrzymujący piętę.

---

Na koniec proszę zapiąć od dołu do góry trzy pasy przy nodze. Proszę uważać na to, żeby pasy przylegały gładko do poduszki i były mocno zapięte na przedzie. Nie wolno jednakże spowodować tym utrudnień w krążeniu krwi. W celu dodatkowej stabilizacji podudzia można umocować przy poduszce załączone osłony plastikowe. Szersza z nich przeznaczona jest do obszaru łydki. Kawałki poduszki można użyć do dodatkowego wyściełania (np. nad podbiciem stopy, przy pasie przytrzymującym piętę, między kostką a stawem).

**Skład produktu:** Aluminium, Pianki PU, Bawełna

### Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- po operacyjnie leczonych uszkodzeniach więzadeł, tkanki miękkiej i ścięgien
- do pooperacyjnego i zachowawczego leczenia pęknięć kości strzałkowej
- zwichnięcia stawu skokowego
- zachowawcze leczenie uszkodzeń śródstopia, przodostopia oraz stępu
- przy chronicznej niestabilności więzadeł
- leczenie po złamaniach stępu, kości piętowej i kostki bocznej
- do wczesnej terapii funkcjonalnej przy zerwaniu ścięgna Achillesa przy zachowawczej i operacyjnej terapii

### Przeciwwskazania

- Niestabilne złamania i złamania bliższej części kości piszczelowej lub strzałkowej
- Uszkodzenia części miękkich i zaburzenia gojenia ran
- Istniejące zaburzenia odpływu chłonki
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach lub stopach (np. w przypadku cukrzycy)

### Rozmiar

rozmiar buta EU	32 - 38	38 - 43	43 - 48
rozmiar	S	M	L
numer artykułu	G.160.002	G.160.003	G.160.004

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** ciemnoniebieski

**Rozmiar:** L , M , S