

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladka-do-butow-igli-allround-p-7954.html>



Wkładka do butów igli Allround

Numer katalogowy	9866
Producent	Medi

Opis produktu

Indywidualne odciążenie, pobudzenie pracy mięśni

- Dla różnych zastosowań
- Wygodne w noszeniu
- Rozkłada nacisk i odciąża

Zmniejszenie bólu i indywidualne odciążenie

Wiek, waga, obciążenie, sposób poruszania się i jego nasilenie mają wpływ na bierne funkcje postawy i zabezpieczenia narządu ruchu. Takie czynniki jak twarde podłoża, ciasne buty, nieprawidłowe obciążenie oraz brak ruchu i treningu mięśni stopy dodatkowo sprzyjają tym niekorzystnym efektom.

Wkładka ortopedyczna igli Allround zapewnia dynamiczne wsparcie i odciążenie stopy dzięki stabilności kształtu w połączeniu z elastycznością materiału z włókna węglowego. Pobudza to mięśnie do pracy, przez co stopa podlega fizjologicznemu treningowi. Sensomotorycznie aktywujące wkłady wzmacniają samopoznanie ciała. Ma to korzystny wpływ na pozycję stawów, napięcie mięśni oraz postawę ciała.

Zalety produktu

- Zmniejszona amortyzacja
- Odpowiednia do uprawiania sportu

Sposób działania

Optymalizacja sprawności
Zmniejszenie dolegliwości związanych z daną dyscypliną sportu
Celowo pobudzanie mięśni przez wkłady sensomotoryczne

Informacje techniczne

Włókno węglowe może być selektywnie podgrzewane za pomocą pistoletu ciepłego na części zewnętrznej i wewnętrznej łuku podłużnego wkładki, a także na częściach wewnętrznych włókna węglowego i może zostać łatwo podniesiony lub spłaszczony. Uformowanie ciepłe jest procesem nieodwracalnym - kształtowanie za pomocą zbyt dużej siły może prowadzić do naruszenia

struktury węglowej

Nie używaj pieca ani nie nagrzewaj całego włókna węglowego za pomocą pistoletu termicznego, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować zachowania kształtu pustych modeli

Trzpienie mogą być szlifowane w zależności od potrzeb

Okres przechowywania wkładek węglowych igli wynosi dwa lata

Przechowuj modele wkładek w temperaturze pokojowej i nie narażaj ich na działanie źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Wkładki należy nosić w dopasowanych butach

Regularnie sprawdzaj, czy Twoja wkładka gwarantuje funkcjonalność i skuteczność

Samodzielnie nie zmieniaj ustawienia trzpieni - jakiegokolwiek zmiany może dokonać tylko ekspert przeszkolony z systemu igli

Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi nieuzasadniony ból lub nieprzyjemne uczucie, należy usunąć go natychmiast i skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, technikiem ortopedycznym

Nie wolno zostawiać z dziećmi samych w wieku poniżej 6 lat z wkładkami, ponieważ mogą połknąć niewielkie części znajdujące się w zestawie.

Można je wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Skład produktu

Czarna mikrofibra

Thermosoft żółty (około 40 ° Shore A)

Włókno węglowe

Instrukcja prania

- Do czyszczenia wkładki używać wilgotnej ściereczki
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników zawierających aceton
- Nie suszyć wkładek na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie źródła ciepła
- Nie prać
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie

Wskazania

- Płaskostopie
- Obniżony łuk podłużny
- Płaski łuk poprzeczny
- Stopa koślawa

Bezwzględne przeciwwskazania

- Cukrzyca
- Neuropatie
- Parkinson
- Ciężka deformacja stóp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50