

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladka-do-butow-igli-business-silver-wersja-kobieca-p-7957.html>



## Wkładka do butów igli Business Silver wersja Kobieca

Numer katalogowy **9869**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Wybitnie cienka i lekka

- Dla butów biznesowych i modnych
- Podwyższony standard higieniczny dla stóp dzięki zastosowaniu srebrnych włókien.
- Dostępny w wersji męskiej i damskiej

### Dynamiczne wsparcie i odciążenie w modnych butach

Ze szczególnie cienkiego, elastycznego materiału z włókna węglowego w połączeniu z lekką wyściółką powstał środek pomocniczy do szczególnie lekkiego i smukłego obuwia. Wkładki są indywidualnie dopasowywane do modnego obuwia biznesowego. Umieszczenie wkładów w obszarze śródstopia przyczynia się dożądanego odciążenia i korekcji. Dzięki elastycznej konstrukcji oraz interaktywnie pobudzającym wkładom wkładka jest w stanie celowo wpływać na aktywność mięśni i przebieg ruchów – nawet w butach o raczej smukłym kroju. W pokrycie wkładki igli Business Silver jest wetkana srebrna nitka, która zmniejsza liczbę powodujących nieprzyjemny zapach bakterii.

#### Zalety produktu

- Antybakteryjna
- Wysoce elastyczna
- Niezwykle cienka

#### Sposób działania

Wsparcie i amortyzacja przedstopia  
Interaktywne pobudzenie sensomotoryczne  
Hamuje powodujące nieprzyjemny zapach bakterie przy pomocy srebrnych nitek

#### Informacje techniczne

Włókno węglowe może być selektywnie podgrzewane za pomocą pistoletu cieplnego na części zewnętrznej i wewnętrznej łuku

---

podłużnego wkładki, a także na częściach wewnętrznych włókna węglowego i może zostać łatwo podniesiony lub spłaszczony. Uformowanie cieplne jest procesem nieodwracalnym - kształtowanie za pomocą zbyt dużej siły może prowadzić do naruszenia struktury węglowej

Nie używaj pieca ani nie nagrzewaj całego włókna węglowego za pomocą pistoletu termicznego, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować zachowania kształtu pustych modeli

Trzpienie mogą być szlifowane w zależności od potrzeb

Okres przechowywania wkładek węglowych igli wynosi dwa lata

Przechowuj modele wkładek w temperaturze pokojowej i nie narażaj ich na działanie źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego

### **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**

Wkładki należy nosić w dopasowanych butach

Regularnie sprawdzaj, czy Twoja wkładka gwarantuje funkcjonalność i skuteczność

Samodzielnie nie zmieniaj ustawienia trzpieni - jakiegokolwiek zmiany może dokonać tylko ekspert przeszkolony z systemu igli

Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi nieuzasadniony ból lub nieprzyjemne uczucie, należy usunąć go natychmiast i skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, technikiem ortopedycznym

Nie wolno zostawiać z dziećmi samych w wieku poniżej 6 lat z wkładkami, ponieważ mogą połączyć niewielkie części znajdujące się w zestawie.

Można je wyrzucać razem z odpadami domowymi.

### **Skład produktu**

Mężczyźni:

X-statyczny czarny z włóknami srebrnymi

PPT niebieski (około 15 ° Shore A)

Paraskin antracyt

Włókno węglowe

Kobiety:

X-statyczny czarny z włóknami srebrnymi

Purpura PPT (około 15 ° Shore A)

Paraskin antracyt

Włókno węglowe

### **Instrukcja prania**

- Do czyszczenia wkładki używać wilgotnej ściereczki
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników zawierających aceton
- Nie suszyć wkładek na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie źródła ciepła
- Nie prać
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie

### **Wskazania**

- Płaskostopie
- Obniżony łuk podłużny
- Płaski łuk poprzeczny
- Stopa koślawą

### **Bezwzględne przeciwwskazania**

- Cukrzyca
- Neuropatie
- Parkinson
- Ciężka deformacja stóp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44

---

**Odmiany:** kobiety , kobiety, otyłe