

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladka-do-butow-z-wlokna-weglowego-igli-comfort-p-7958.html>



Wkładka do butów z włókna węglowego igli Comfort

Numer katalogowy **9870**

Producent **Medi**

Opis produktu

Komfortowa wyściółka i ochrona stawów

- Dla butów biznesowych i modnych
- Podwyższony standard higieniczny dla stóp dzięki zastosowaniu srebrnych włókien.
- Dostępny w wersji męskiej i damskiej

Przyjemna wyściółka i aktywne pobudzenie ukrwienia

Warunki szkieletu i mięśni zmieniają się z wiekiem. Dochodzi do stopniowego osłabienia elastyczności i endogennych mechanizmów amortyzacji stąpania.

Wkładkę igli Comfort zaprojektowano dla stóp o zwiększonym zapotrzebowaniu komfortu oraz w celu celowej aktywacji. Zapewnia ona szczególnie miękkie wyściełanie całej stopy, co zmniejsza siły oddziaływujące w okolicy stopy, stawu kolanowego, stawu biodrowego i kręgosłupa. Pobudzenie sensomotoryczne poszczególnych obszarów pod stopą może prowadzić do aktywacji mięśni z korzystnym wpływem na przebieg ruchów.

Guzki trące pobudzają celowo ukrwienie w stopie.

Zalety produktu

- Elastyczne wsparcie
- Komfortowa amortyzacja
- Wyściełająca i korygująca

Sposób działania

Rozłożenie nacisku
Ochrona stawów
Guzki trące pobudzają ukrwienie

Informacje techniczne

Włókno węglowe może być selektywnie podgrzewane za pomocą pistoletu cieplnego na części zewnętrznej i wewnętrznej łuku

podłużnego wkładki, a także na częściach wewnętrznych włókna węglowego i może zostać łatwo podniesiony lub spłaszczony. Uformowanie cieplne jest procesem nieodwracalnym - kształtowanie za pomocą zbyt dużej siły może prowadzić do naruszenia struktury węglowej

Nie używaj pieca ani nie nagrzewaj całego włókna węglowego za pomocą pistoletu termicznego, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować zachowania kształtu pustych modeli

Trzpienie mogą być szlifowane w zależności od potrzeb

Okres przechowywania wkładek węglowych igli wynosi dwa lata

Przechowuj modele wkładek w temperaturze pokojowej i nie narażaj ich na działanie źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Wkładki należy nosić w dopasowanych butach

Regularnie sprawdzaj, czy Twoja wkładka gwarantuje funkcjonalność i skuteczność

Samodzielnie nie zmieniaj ustawienia trzpieni - jakiegokolwiek zmiany może dokonać tylko ekspert przeszkolony z systemu igli

Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi nieuzasadniony ból lub nieprzyjemne uczucie, należy usunąć go natychmiast i

skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, technikiem ortopedycznym

Nie wolno zostawiać z dziećmi samych w wieku poniżej 6 lat z wkładkami, ponieważ mogą połknąć niewielkie części znajdujące się w zestawie.

Można je wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Skład produktu

Velours bordeaux

PPT barwa skóry (około 10-15 ° Shore A)

EVA czarny (ok. 30 ° Shore A)

Włókno węglowe

Instrukcja prania

- Do czyszczenia wkładki używać wilgotnej ściereczki
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników zawierających aceton
- Nie suszyć wkładek na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie źródła ciepła
- Nie prać
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie

Wskazania

- Płaskostopie
- Obniżony łuk podłużny
- Płaski łuk poprzeczny
- Stopa koślawą

Przeciwwskazania

- Cukrzyca
- neuropatie
- Parkinson
- Ciężka deformacja stóp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48