

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladka-do-butow-z-wlokna-weglowego-igli-control-p-7960.html>



Wkładka do butów z włókna węglowego igli Control

Numer katalogowy **9872**

Producent **Medi**

Opis produktu

Zmniejszenie dolegliwości do minimum, ochrona stawów

- Wspomaga proces przetaczanie stopy
- Łagodzi bóle stawów
- Skórzana pokrywa zapewnia przyjemny komfort

Zmniejszenie dolegliwości i bólu oraz wsparcie stawów

Paluch sztywny (hallux rigidus) to bolesny stan podrażnienia stawu śródstopno-palcowego palucha, polegający na ograniczeniu zgięcia grzbietowego stopy w tym stawie podczas chodzenia lub biegania. Może to prowadzić do wystąpienia dolegliwości w stawie kolanowym, biodrowym lub w kręgosłupie.

Dzięki usztywniaczowi z włókna węglowego z jednej strony i wkładkom z drugiej strony wkładka igli Rigidus odciąża i stabilizuje staw oraz przyczynia się do korekcji chodu. Przy prawidłowym zastosowaniu wkładka może w ten sposób pomóc w krótkim czasie znacznie zmniejszyć ból i stan zapalny.

Zalety produktu

- Stabilne prowadzenie przedstopia
- Elastyczność i dobra amortyzacja
- Wyściełająca wkładka
- Korygująca

Sposób działania

Zmniejsza kąt zginania stawu metatarsophalangeal koslawego palucha w stopie
Wspiera łuk poprzeczny stopy i pomaga indywidualnie w korekcji ustawienia stopy
Zapewnia długotrwałe sukces w leczeniu dzięki ukierunkowanej aktywacji mięśni
Wpływa na ustawienie stawu, napięcie mięśni i postawę ciała

Informacje techniczne

Włókno węglowe może być selektywnie podgrzewane za pomocą pistoletu ciepłego na części zewnętrznej i wewnętrznej łuku podłużnego wkładki, a także na częściach wewnętrznych włókna węglowego i może zostać łatwo podniesiony lub spłaszczony. Uformowanie ciepłe jest procesem nieodwracalnym - kształtowanie za pomocą zbyt dużej siły może prowadzić do naruszenia struktury węglowej

Nie używaj pieca ani nie nagrzewaj całego włókna węglowego za pomocą pistoletu termicznego, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować zachowania kształtu pustych modeli

Trzpienie mogą być szlifowane w zależności od potrzeb

Okres przechowywania wkładek węglowych igli wynosi dwa lata

Przechowuj modele wkładek w temperaturze pokojowej i nie narażaj ich na działanie źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Wkładki należy nosić w dopasowanych butach

Regularnie sprawdzaj, czy Twoja wkładka gwarantuje funkcjonalność i skuteczność

Samodzielnie nie zmieniaj ustawienia trzpieni - jakiegokolwiek zmiany może dokonać tylko ekspert przeszkolony z systemu igli

Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi nieuzasadniony ból lub nieprzyjemne uczucie, należy usunąć go natychmiast i skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, technikiem ortopedycznym

Nie wolno zostawiać z dziećmi samych w wieku poniżej 6 lat z wkładkami, ponieważ mogą połknąć niewielkie części znajdujące się w zestawie.

Można je wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Skład produktu

Biała perforowana skóra

Vacusoft biały (około 35 ° Shore A)

Włókno węglowe

Instrukcja prania

- Do czyszczenia wkładki używać wilgotnej ściereczki
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników zawierających aceton
- Nie suszyć wkładek na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie źródła ciepła
- Nie prać
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie

Wskazania

- Sztywny paluch
- Paluch koślawy
- Płaskostopie
- Obniżony łuk podłużny
- Płaski łuk poprzeczny
- Stopa koślawą

Przeciwwskazania

- Cukrzyca
- Neuropatie
- Parkinson
- Ciężka deformacja stóp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48