

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladka-do-butow-z-wlokna-weglowego-igli-ostroga-pietowa-p-7961.html>



Wkładka do butów z włókna węglowego igli Ostroga Piętowa

Numer katalogowy **9873**

Producent **Medi**

Opis produktu

Natychmiastowe celowe odciążenie

- W przypadku problemów z ostrogą piętową
- Odciąża cały obszar pięty
- Cienka konstrukcja przeznaczona do obuwia sportowego

Natychmiastowe odciążenie i aktywne zmniejszenie bólu

Ostroga piętowa to narośl kostna w obrębie przyczepów ścięgniętych kości piętowej. Może w niej dojść do bardzo bolesnego zapalenia. Bez skutecznej terapii stan ostrogi piętowej może się coraz bardziej pogarszać i przyjąć nawet charakter przewlekły.

Wkładka igli Ostroga Piętowa umożliwia technikowi bardzo indywidualne, w trakcie leczenia zmienne zaopatrzenie pacjenta. Pierwszorzędownym celem zaopatrzenia we wkładkę igli Ostroga Piętowa jest szybkie odciążenie stanu podrażnienia wokół ostrogi piętowej i układu ścięgien. Za pomocą wkładów technik, lekarz i terapeuta są w stanie osiągnąć razem z pacjentem optymalne zniesienie obciążenia. Drugim istotnym efektem jest miękkie wyściełanie ostrogi płynnym silikonem w miejscu jej występowania i wzdłuż podrażnionego ścięgna.

Zalety produktu

- Elastyczna
- Amortyzująca
- Wyściełająca, korygująca
- Wstawka silikonowa

Sposób działania

Zmniejszenie nacisku i natychmiastowe odciążenie
Pomoc w redukcji stanów zapalnych i bólu
Interaktywne pobudzenie sensomotoryczne

Informacje techniczne

Włókno węglowe może być selektywnie podgrzewane za pomocą pistoletu cieplnego na części zewnętrznej i wewnętrznej łuku podłużnego wkładki, a także na częściach wewnętrznych włókna węglowego i może zostać łatwo podniesiony lub spłaszczony. Uformowanie ciepłe jest procesem nieodwracalnym - kształtowanie za pomocą zbyt dużej siły może prowadzić do naruszenia struktury węglowej

Nie używaj pieca ani nie nagrzewaj całego włókna węglowego za pomocą pistoletu termicznego, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować zachowania kształtu pustych modeli

Trzpienie mogą być szlifowane w zależności od potrzeb

Okres przechowywania wkładek węglowych igli wynosi dwa lata

Przechowuj modele wkładek w temperaturze pokojowej i nie narażaj ich na działanie źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Wkładki należy nosić w dopasowanych butach

Regularnie sprawdzaj, czy Twoja wkładka gwarantuje funkcjonalność i skuteczność

Samodzielnie nie zmieniaj ustawienia trzpieni - jakiegokolwiek zmiany może dokonać tylko ekspert przeszkolony z systemu igli

Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi nieuzasadniony ból lub nieprzyjemne uczucie, należy usunąć go natychmiast i skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, technikiem ortopedycznym

Nie wolno zostawiać z dziećmi samych w wieku poniżej 6 lat z wkładkami, ponieważ mogą połączyć niewielkie części znajdujące się w zestawie.

Można je wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Skład produktu

Ciemnoszara mikrofibra

Jasnoniebieski mikrofibry

Warstwa pośrednia

EVA niebieski (około 35 ° Shore A)

Włókno węglowe

Instrukcja prania

- Do czyszczenia wkładki używać wilgotnej ściereczki
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników zawierających aceton
- Nie suszyć wkładek na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie źródła ciepła
- Nie prać
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie

Wskazania

- Ostroga piętowa
- Rozścięgnięto podeszwowe
- Płaskostopie
- Obniżony łuk podłużny
- Płaski łuk poprzeczny
- Stopa koślawa

Przeciwwskazania

- Cukrzyca
- Neuropatie
- Parkinson
- Ciężka deformacja stóp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

