

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-dla-dzieci-ortho-line-doublecare-kid-ko11-p-7988.html>



Wkładki dla dzieci Ortho Line DOUBLECARE KID KO11

Numer katalogowy **13341**

Producent **Mazbit**

Opis produktu

- wkładki, które wspierają łuk podłużny i wyraźnie stabilizują stopę
- głębokie korytkowe ukształtowanie tyłostopia sprawia, że pięta pozostaje stabilna podczas stawianiu każdego kroku
- dodatkowe wyprofilowanie na końcu zewnętrznej części korytka aktywizuje mięśnie strzałkowe, odpowiedzialne za utrzymanie fizjologicznego wysklepienia stopy
- delikatnie uniesione pole pod palcami zwiększa kontrolę ruchu podczas chodzenia

Rodzaj
Przeznaczenie
Rozmiar

Wkładki dla dzieci
Płaskostopie podłużne, Koślawość pięty
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Pranie

Mycie ręczne
Pranie w temperaturze 30°C
Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36