

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-atomic-m0305-p-8005.html>

## Wkładki Medic Line ATOMIC M0305



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>13358</b>  |
| Producent        | <b>Mazbit</b> |

### Opis produktu

- wkładki komfortowe dla osób z płaskostopiem podłużnym w początkowym stadium
- delikatny profil podpira łuk podłużny stopy
- zalecane dla diabetyków, kobiet w ciąży, osób z wrażliwymi stopami
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie  
Wykonanie  
Rozmiar

Wkładki dla dorosłych  
Pozostałe dolegliwości  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty  
Wyściółka, wyprofilowana pianka lateksowa  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46