

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-mario-kid-mk464-p-8027.html>

Wkładki Medic Line MARIO KID MK464



Numer katalogowy	13380
Producent	Mazbit

Opis produktu

- wkładki dla dzieci z płaskostopiem podłużnym i stopą płasko-koślawą
- korytkowy profil stabilizuje tyłostopie i wspiera prawidłowy rozwój stopy dziecka
- zalecane do obuwia luźnego
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie
Wykonanie

Rozmiar

Wkładki dla dzieci
Płaskostopie podłużne, Koślawość pięty
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
Wyściółka, pianka lateksowa z zawartością węgla aktywnego,
sztywny korytkowy profil
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35