

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-perfect-plus-m0476-p-8018.html>



Wkładki Medic Line PERFECT PLUS M0476

Numer katalogowy **13371**

Producent **Mazbit**

Opis produktu

- wkładki dla osób z płaskostopiem poprzecznym i płaskostopiem podłużnym
- absorbują mikrostrząsy powstające w momencie kontaktu stopy z podłożem
- dla osób aktywnych
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie
Wykonanie

Wkładki dla dorosłych
Płaskostopie podłużne, Płaskostopie poprzeczne
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
Wyściółka, pelota, pianka żelująca z zawartością węgla aktywnego, amortyzator pięty, elastyczny profil
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Rozmiar

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48