

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-sup-med-5-mm-mo431-p-8022.html>



Wkładki Medic Line SUP MED 5 mm MO431

Numer katalogowy **13375**

Producent **Mazbit**

Opis produktu

- wkładki dla osób z koślawym ustawieniem stawów skokowych
- profil unosi wewnętrzną stronę stopy (supinuje stopę), głównie w okolicy pięty
- zalecane dla osób ze stopami nadpronującymi, do obuwia pełnego z usztywnionym tyłostopiem
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie
Wykonanie

Wkładki dla dorosłych
Koślawość pięty
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie
Naturalna skóra, sztywny profil, pianka lateksowa z zawartością węgla aktywnego
35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
5 mm MO431
10 mm MO432

Rozmiar
Wysokość

Pranie

Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźnia ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42 , 43/44 , 45/46 , 47/48