

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-twist-mo413-p-8025.html>

## Wkładki Medic Line TWIST MO413



Numer katalogowy **13378**

Producent **Mazbit**

### Opis produktu

- wkładki 3/4 dedykowane dla osób z płaskostopiem poprzecznym
- miękki profil delikatnie odciąża śródstopie
- zalecane dla osób ceniących wygodę, do stosowania do obuwia na wysokim obcasie, również w butach otwartych
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie

Wkładki dla dorosłych  
Płaskostopie poprzeczne  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Baleriny,  
Sandały, Czółenka

Wykonanie  
Rozmiar

Naturalna skóra, miękki profil, pianka lateksowa  
34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle ( szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 34 , 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42