

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladki-medic-line-venus-m0284-p-8026.html>

## Wkładki Medic Line VENUS M0284



Numer katalogowy	<b>13379</b>
Producent	<b>Mazbit</b>

### Opis produktu

- wkładki na płaskostopie poprzeczne i haluks
- elastyczna pelota metatarsalna znacząco odciąża głowy kości śródstopia II, III i IV
- dla osób potrzebujących wyraźnego wsparcia łuku poprzecznego stopy
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj	Wkładki dla dorosłych
Przeznaczenie	Płaskostopie poprzeczne, Haluks
Obuwie	Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie
Wykonanie	Wyściółka, pelota, pianka lateksowa z zawartością węgla aktywnego
Rozmiar	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46