

Link do produktu: <https://akmed.pl/wsparcie-scięgna-rzepki-medi-patella-tendon-support-p-7863.html>



Wsparcie ścięgna rzepki medi Patella tendon support

Numer katalogowy **9773**

Producent **Medi**

Opis produktu

Wsparcie ścięgna rzepki

- Anatomiczny kształt
- Materiał przyjazny dla skóry

Opaska na ścięgno rzepki

Ucisk na czworogłowe ścięgno poprawiający kondycję poprzez wzmocnienie mięśni wspierających staw kolanowy.

Zalety produktu

- Anatomiczny kształt wkładki
- Przyjazny materiał dla skóry

Sposób działania

Ucisk na czworogłowe ścięgno poprawiający kondycję poprzez wzmocnienie mięśni wspierających staw kolanowy.

Instrukcja dotycząca zakładania

Otworzyć pasek na rzep.
Umieścić bandaż pod rzepką
Mocno zaciągnąć pasek na rzep.

Skład produktu: Lycra

Instrukcja prania

Do prania należy zamknąć zapięcia na rzep. Pozostałości mydła, płynów kosmetycznych i maści mogą powodować podrażnienie skóry i zużycie materiału.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej detergentem medi clean lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie prać chemicznie.

Wskazania

- Ból związany z brakiem prawidłowej transmisji rzepkowo-udowej
- Małe niestabilności stawu kolanowego

Przeciwwskazania

- Choroby lub urazy skóry w obszarze zastosowania, zwłaszcza z objawami zapalnymi (nadmierne rozgrzanie, obrzęk lub zaczerwienienie)
- Wrażliwość i zaburzenia dopływu krwi nóg (np. w przypadku cukrzycy)
- Zaburzenia odpływu chłonki oraz nierozpoznane obrzęki tkanek miękkich, z dala od obszaru zastosowania

Rozmiar

rozmiar
numer artykułu

uniwersalny
G.200.009