

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-orteza-tulowia-ze-stalkami-pt0229-p-2697.html>



## Wysoka orteza tułowia ze stawkami PT0229

Numer katalogowy	<b>PT0229</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- stabilizacja kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii
- wzmożone napięcie mięśniowe przy dyskopatii lędźwiowej, w procesach zapalnych stawów kręgosłupa, w trakcie leczenia pooperacyjnego oraz w czasie rehabilitacji pourazowej
- wzmocnienie mięśni podczas wykonywania pionizacji pacjenta z urazem ortopedycznym lub neurologicznym
- doleczenie urazów, złamania patologicznych kręgów, zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa, zwłaszcza w pozycjach wymuszonych i niekorzystnych dla kręgosłupa
- ZZSK, zmiany zwyrodnieniowe

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]	70 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	131 - 140

Wysoka orteza tułowia ze stawkami to orteza zapinana na rzepy, wykonana z przewiewnej taśmy elastycznej, ze wzmocnieniami w odcinku lędźwiowym. Posiada taśmy dociągające, umożliwiające indywidualne dopasowanie oraz regulację siły ucisku. Orteza silnie podpira część lędźwiową, jest doskonale dopasowana anatomicznie do ciała, wygodna w noszeniu.

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

---

**Sposób zakładania:**

Odpiąć rzepy. Część ortezy, w której umieszczone są stalki/fiszbiny przyłożyć do odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa. Główne taśmy zapiąć z przodu na rzep, a następnie zapiąć taśmy dociągające po obu stronach ortezy.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować! Nie czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła.

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Uwaga:**

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL