

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-sznurówka-polsztywna-z-podpaskami-pt0224-p-2715.html>



Wysoka sznurówka półsztywna z podpaskami PT0224

Numer katalogowy	PT0224
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wypadnięcia tarcz międzykręgowych – leczenie pooperacyjne lub zachowawcze
- zmiany degeneracyjne kręgosłupa
- dolegliwości bólowe z powodu utrwalonych zmian zniekształcających kręgosłupa
- procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa
- neuropatyczne zespoły bólowe
- zmiany osteoporotyczne
- osłabienie mięśni
- choroby krążka międzykręgowego

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód brzucha [cm]	80 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120	121 – 140

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

Zmierzyć obwód brzucha, a następnie dopasować rozmiar z tabeli umieszczonej na opakowaniu.

Sposób zakładania:

1. odpiąć rzepy
2. nałożyć stabilizator wokół brzucha tak, żeby na plecach przypadła część z długimi wkładkami (rys. 1)
3. zapiąć zapięcie z przodu na rzep, a następnie zapiąć taśmy dociągające regulujące ucisk (rys. 2)
4. górne taśmy przełożyć pod pachami, skrzyżować z tyłu i zapiąć na części przedniej (rys. 3 i 4)
5. upewnić się, że stabilizator dobrze przylega w każdej części i nie powoduje dyskomfortu (rys. 5)

Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Konserwacja:

Pranie. Przed praniem wyjąć z tylnej części stabilizatora wkładki. Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C, w delikatnych środkach piorących, bez wybielaczy i płynów zmiękczających, płukać wielokrotnie, nie chlorować, nie czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Po wysuszeniu umieścić w tych samych miejscach wcześniej wyjęte elementy.

Uwagi:

- Użytkownik nie powinien mechanicznie ingerować w wyrób.
- W przypadku niewłaściwie dobranego rozmiaru może nastąpić czasowe upośledzenie pracy jelit i narządów wewnętrznych lub upośledzenie wydolności krążeniowo - oddechowej.
- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przeszkolony personel medyczny.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto maści rozgrzewającej.
- Wyrób można stosować na bawełnianą koszulkę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL